

**Bruks-, Monterings- og Vedlikeholdsanvisning  
for AlfaCare overmadrasser.****INNLEDNING**

AlfaCare OVERMADRASS er CE-merket og branntestet. Madrassene leveres med inkotrekk som standard, dette er avtakbart og vaskbart. Skulle du ikke ha behov for inkotrekk kan madrassene leveres med et overtrekk i Velur, dette er også avtakbart og vaskbart.

**BASEN**

AlfaCaremadrassene gir brukerne en god trykkavlastning og liggekomfort. Madrassen er av Fleksibel Polyurethanskum, med riktig hardhet for å gi god stabilitet og lang livstid på produktet. Dette skummet former seg lett etter kroppen som derved gir god trykkutjevning og avlastning. Selve madrassen kan vaskes skånsomt på inntil 60°, den må drypptørkes.

**INKOTREKK**

Inkontinensstrekk er av Polyuerthan, dette kan tas av og vaskes i 95° og tørkes i tørketrommel. Trekket er tøybart i fire retninger. Trekket settes på basen og låses til denne ved hjelp av glidelås.

**TREKK VELUR**

Trekket kan vaskes i 60° i maskin. Trekket settes på basen og låses til denne ved hjelp av glidelås. Standard trekket er ikke inkontinensstett.

**MONTERING**

Ikke noen spesiell montering er påkrevet. Bytting/skifting av inkotrekk eller Velurtrekk skjer ved å åpne glidelåsen bak på madrassen og trekke dette av, og sette nytt på i omvendt rekkefølge.

**HAR DU MADRASS MED INKONTINENSTREKK KAN DU AUTOKLAVE PRODUKTET.**

Vi ønsker å gi den noen gode tips eller forsiktighetstips, dette for å unngå unødvendige irritasjoner.

**NOEN GODE TIPS!**

1. Les denne brukerveiledningen før madrassen tas i bruk.
2. Feilaktig bruk kan medføre skade på MADRASSEN.
3. Utstyret må sjekkes for defekter ved mottak. Evt. defekter må snarest rapporteres til distributør.
4. Det er tryggest å bruke sengesystemet med sengegrind hvis sengen har dette.
5. Maksimum brukervekt er 130 kg.
6. Unngå å røyke på sengen.

ALFACARE madrasssystem er utviklet for å forebygge trykksår når bruker er sengeliggende. I tillegg vil brukeren få en god liggekomfort og avlastning ved muskel- og skjelettplager. Prinsippet er bygget på at madrassen er laget av viskoelastisk skum som på en naturlig måte fordeler trykket av kroppen. Madrassen skal legges på en vanlig madrass av god kvalitet.

**TA MADRASSEN I BRUK**

1. Overmadrassen legges på toppen av en vanlig madrass. Den er lik på begge sider, så det spiller ingen rolle hvem side som er opp.
2. Vi anbefaler å bruke ett vanlig laken på toppen av det trekket som sitter på madrassen.
3. Madrassen bør snus hvert halvår for å øke levetiden.

**VIKTIG!**

SKULLE DU FÅ PROBLEMER MED PRODUKTET OG DU HAR SJEKKET  
ETTER DE TIPSENE VI HAR SATT OPP TA KONTAKT MED:

**AlfaCare AS**  
**Merdevn 12B - 3676 Notodden**  
**Tlf: 35 02 95 95 - Fax: 35 02 95 99**  
**post@alfacare.no**

Vi ønsker lykke til med din nye madrass.