

# MEDIROYAL TELESKOPISKT POST-OP KNÄ



## POK110

Denna post-operativa knäortos är designat för att användas för att immobilisera knäleden efter kirurgi. Leden är tillverkad av stål och kan stoppas i 0-80 graders extension och 0-120 graders flexion i 10 graders intervall. Leden kan också låsas helt i 0-80 graders extension. Ledjusteringen sker med hjälp av pins som är monterade under en genomskinlig säkerhetsdisk. Den roteras mot positionen av ledstoppet och kan sedan dras ut och justeras.

Teleskopfunktionen gör att ortosen kan ankras över malleolerna vilket förhindrar att ortosen kan glida ner. Den övre delen kan justeras så att den laterala delen kan göras högre och den mediala lägre för att minska risken för skav när patienten går. Ortosen har cirkulära band, tre upptill och tre nedtill som ger en säker förankring. Polstringen är tillverkad i polyesterskum med öppna celler. Extra polstring och band kan beställas separat.

Indikationer: Post-operativ immobilisering efter knäkirurgi



## POK110 MEDIROYAL TELESKOPISKT POST-OP KNÄ

Universalstorlek  
teleskoplängden kan ställas från 50-72 cm.